



Barre d'appui rotative à ventouse

HCPCS: E0241



FIGURE A



FIGURE B



FIGURE C

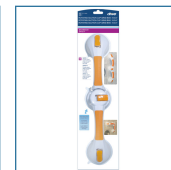


FIGURE D

- Fournit une stabilité supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie du baignoire ou douche.
- Facile à installer ou à retirer grâce aux loquets de verrouillage qui maintiennent la barre d'appui en place.
- Les indicateurs de couleur garantissent une installation sûre et sécurisée. L'affichage vert signifie que la barre d'appui est sécurisée et prête à l'emploi, le rouge s'affichera si le joint n'est pas hermétique.
- Doté d'une poignée en caoutchouc antidérapante et de poignées moulées sur le dessous pour plus de sécurité.
- ATTENTION : la barre d'appui doit être utilisée uniquement comme aide à l'équilibre. Elle n'est pas destinée à supporter le poids du corps, et le poids du corps ne doit pas être appliqué à la barre d'appui. (Si un appareil doit supporter un corps poids, ou est utilisé comme levier, il est recommandé d'installer une barre d'appui traditionnelle montée en permanence.) Avant chaque utilisation, assurez-vous que la barre d'appui est solidement fixée. Si elle peut être déplacée ou semble lâche, relevez les loquets et rattachiez-les conformément à ces instructions. Assurez-vous que la rattache est sécurisée avant utilisation.

PRODUCTS

Description

RTL13084

Ventouse de barre d'appui, AJ, 19 3/4", 1EA, 3/CS

SPECIFICATIONS

Description

Garantie

Durée de vie limitée

Longueur

19,75"

Poids à l'expédition du carton

3,5 livres

Poids

1,0 livre

Barres d'appui

Longueur 19,75"